



## **BROWNE** Test soil

### Puhdistustehontesti instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneille

Brownen pesu- ja desinfiointikoneiden testiaine on tarkoitettu simuloimaan normaalissa leikkaussalikäytössä tapahtuvaa likaantumista, ja se toimii samaan tapaan Edinburghin testiaineen kanssa.

Brownen testiaine antaa puhdistuslaitteille fyysisen haasteen samoin kuin puhdistustehoa koskevat testit, jotka on kuvattu standardissa ISO/TS 15883-5(8) Brownen testiaine toimitetaan jauhemuodossa yksittäisinä testiastioina. Yksi astia, yksi testi.

Riittämätön puhdistuminen voi vaarantaa desinfiointi- ja sterilointiprosessien onnistumisen. Huonosti toimiva pesu- ja desinfiointikone voi jättää käsiteltäviin tuotteisiin mikroskooppisia likajäämiä, jotka voivat vaarantaa sekä desinfiointi- että sterilointiprosessin onnistumisen. Yksi parhaista ja helpoimmista tavoista tarkistaa onko instrumentit puhdistettu tehokkaasti, on antaa puhdistuslaitteelle fyysinen haaste.

Lisää vettä täyttöviivaan asti, aseta suojuus paikalleen, ravista voimakkaasti ja lisää testikuorman mukana toimitetun harjan avulla. Kun testikuorman on annettu kuivua 30 minuutin\*\* ajan huonelämpötilassa, testikuorma puhdistetaan tavalliseen tapaan ja tarkistetaan sen jälkeen likajäämien varalta.

Jokaisessa pakkauksessa on mukana yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

\*\*Kuivumisaika ei saa olla yli 2 tuntia.

Brownen testiaineen kirkkaan punainen väri mahdollistaa niiden alueiden helpon tunnistamisen, jotka eivät ole puhdistuneet kunnolla. Näin laitteiden tehosta saadaan visuaalinen varmistus.

Myrkytön; ei sisällä verituotteita.



Tuotekoodi	Nimike	Pakkaus
2304	Soil test, Pesu- ja desinfiointikoneiden testiaine	10 käyttövalmista testiä / pkt



Franke Medical Oy  
Vartiokuja 1  
76850 Naarajärvi  
P. 015 34 111  
[www.frankemedical.fi](http://www.frankemedical.fi)

