



BROWNE STF Load Check

Puhdistustehontesti instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneille

STF Load Check indikaattori on tarkoitettu käytettäväksi instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneissa osoittamaan koneen puhdistustehoa. Testi on tarkoitettu käytettäväksi rutiinitesteissä. Browne STF Load Check indikaattorin punainen testilika on turvallista käsitellä, helppo havaita ja tulkita.

STF Load Check pidikkeen rakenne jäljittelee vaikeasti puhdistettavia pintoja. Pidikkeen ristikkorakenteen alle muodostuu katvealueita, joista indikaattorissa oleva testiliika on vaikea puhdistaa.

Indikaattorissa oleva testiliika irtoaa pidikkeessä olevasta testiliuskasta vain, jos pesu- ja desinfiointikoneen puhdistusteho on riittävä ja koneen kyky pakottaa vesi ja pesuaine tunkeutumaan vaikeasti puhdistuviin katvealueisiin on riittävällä tasolla.



Testin käyttö on helppoa. Aseta STF Load Check indikaattori pidikkeeseen ja laita pidike instrumenttikoriin. Käynnistä pesuohjelma. Ohjelman päätyttyä, poista indikaattori pidikkeestä ja tarkasta tulos. Kuivuneen testilian tulee olla hävinnyt indikaattorin pinnalta.

- ✓ BS2745: 1993 Specifications for washer disinfectors for medical purposes
- ✓ ISO/TS 15883-5:2005 washer-disinfectors: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy
- ✓ HTM2030: washer-disinfectors

Tuote ei sisällä verta.



Tuotekoodi	Nimike	Pakkaus
2315	STF Load Check –indikaattori	100 kpl / pkt
2316	STF Load Check –pidike	1 kpl / pkt



Franke Medical Oy
 Vartiokuja 1
 76850 Naarajärvi
 P. 015 34 111
 www.frankemedical.fi

